

リフティ・ピーヴォ

製造元：株式会社エナジーフロント

コンパクトなクッションリフトですが、
引っ張り試験で200kg以上の強度を誇ります
(倉敷帆布使用)
色移りせずに普通に洗濯が可能です
クッション部分は耐圧分散と抗菌性に優れる
天然ラテックスフォームを採用しております
ずり落ちを防ぐ、すべり止め仕様です
膝ベルトはマイクロファイバーでできた
肌に優しい特殊面ファスナーを使用しております

【スペック】

リフティ (クッション)

座幅40cm×奥行30cm×高さ30cm
重量 約800g

ピーヴォ (膝ベルト)

縦14cm×横114cm 重量 約250g

【カラー】

レッド (赤)、オレンジ (橙)

デニム (インディゴ・紺)、ホワイト (白)

【希望小売価格】

リフティ・ピーヴォ (クッションと膝ベルトのセット)

33,000円 (税込)

ピーヴォ (膝ベルトのみ)

16,000円 (税込)

AUN
Action for Universal design



リフティ (クッション)



ピーヴォ (膝ベルト)

リフティ タタミ



防水タタミで入浴時、シャワー時にご利用可能です。
使用方法・サイズはリフティ・ピーヴォと同じです。

【希望小売価格】

リフティ・タタミ (座面と膝ベルトのセット)

38,500円 (税込)

リフトアシストジーンズ

リフティのズボン（ジーンズ）タイプで使い方も同じです。
ゴムウエストで股上が深く、どんな体型の方にもおすすめです。
臀部には体重を支えるために、丈夫な生地と強い縫製を、
ズボンの横についた持ち手部分は引っかからないように、
マイクロファイバーを使用した面ファスナーで普段はズボンにくっつけています。
リフティ同様にピーヴォと併用すると介助者の腰痛リスクを軽減します。



【サイズ】男女兼用（単位：cm）			
サイズ	ヒップ	ウエスト	股下
SS	68-80	98	63
S	80-90	100	65
M	84-100	105	68
L	90-108	108	68
LL	95-113	114	69



【希望小売価格】
リフトアシストジーンズ・ピーヴォセット
33,000円（税込）
※ピーヴォの色はデニムになります
リフトアシストジーンズのみ
21,500円（税込）


お問い合わせ先（正規販売店）

株式会社障碍社 福祉用具事業所 I R S（アイアールエス）
〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-11-15 大三ビル102
TEL：042-851-4579／FAX：042-851-4589
E-MAIL：irs@shogaisha.co.jp

介護の腰痛対策に最適！

てこの原理で
80kgでも5kg以下に

リフティ・ピーヴォ

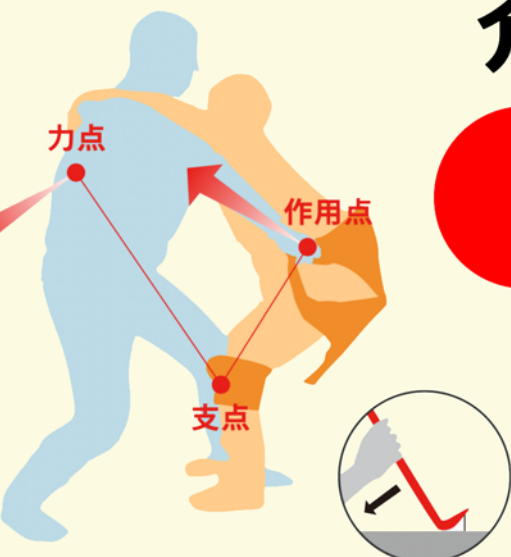

希望小売価格 ￥33,000 (税込)



STEP 1

ひざを固定



使い方動画と説明はこちら➡



ご使用の判断

- 相手は両足がある
- ひざや足の骨は脆くない
- 著しい尖足等の変形がなく足裏が床につく

No → 使用不可

Yes

- 相手の体重は自分の2倍以下
- 相手の身長は自分より30cm以上大きくない

No → 使用不可

Yes

相手は前傾になれる

No

Yes



座位を保てない相手は腹部にクッションを挟んでも良い



軽い相手は大きく前傾に
しなくても使える



自分と同等の体重なら上げられる
トランスファーボードと組み合わせて
も良い

STEP 2

相手を前傾に



STEP 3

重心を後ろに



拘縮があり反った相手への使用



座面を分離し背中に
差し込みます



膝を押し当て脇の下から
持ち手をつかみます



重心を後ろ側の足に移します

着座者への使用やトイレの場面



座面は使わず、ピーヴォを
巻きつけ膝を押し当てます



押し当てる足の逆の脇に頭を
入れます
相手の背中に腕を回し上体を
持ち膝をつきます




押し当てる足と逆の手が
自由になります
空いた手で座面を敷き込んだり
ズボンをずらしてトイレに移乗します

ベッドでの敷き込み方法



向こう側に倒します

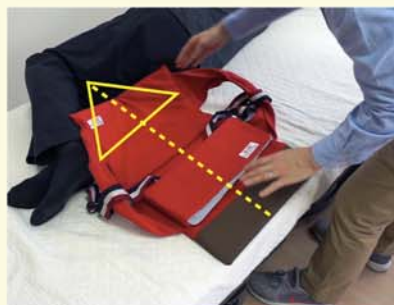

座面の中心を膝と合わせ
お尻の下に端を突き込みます



手前側に倒します



足を車椅子に乗せ膝ベルトを
巻きます



足を下ろし上体を起こします




移乗します

お問い合わせ先（正規販売店）
株式会社障碍社 福祉用具事業所IRS（アイアールエス）
〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-11-15大三ビル102
TEL:042-851-4579 / FAX:042-851-4589
E-MAIL:irs@shogaisha.co.jp
受付時間 9:30～17:30（土日祝日、年末年始を除く）

介護負担軽減

てこの原理で
80kgでも5kg以下に

リフトアシストジーンズ
+
ピーヴォ

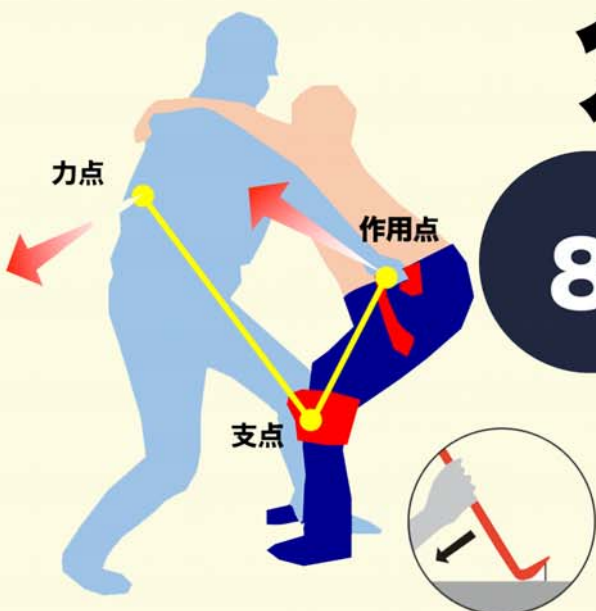

STEP 1

ひざを固定



使い方動画と説明はこちら→

<http://www.aun.blue/lift-assist-jeans/>



STEP 2

相手を前傾に



クッションをいれても良いです



STEP 3

重心を後ろに



リフトアシストジーンズ



ピーヴォ

使用の対象となる方

ピーヴォを使うと、自力で立てない相手も簡単に移乗できます。

- ・ 両足の骨があること（骨が脆い方は使用不可）
- ・ 足の裏全面が床につくこと
- ・ 体重の目安を超えない相手

相手の体重の目安：前傾になれる相手なら自分の体重の2倍

起立介助（ピーヴォなし）

膝がくずれやすい方はピーヴォを併用してください



肩に手をかけてもらいます



持ち手をつかみます



後ろに下がる重心移動で
引き上げます

拘縮があり反った相手には

相手の体重の目安：自分の体重と同等の相手が対象



ピーヴォを巻きつけ膝を
押し当てます



脇の下から上体を持ちます



膝を押し当て重心を後ろに
引くと相手が上がります

トイレ介助

相手の体重の目安：自分の体重と同等の相手が対象




ピーヴォを巻きつけ膝を
押し当てます



押し当てる足と逆の脇に頭を
入れます。相手の背中に
腕を回し上体を持ち膝をつきます



押し当てる足と逆の手が自由にな
ります。空いた手がズボンを
ずらしてトイレに移乗します。

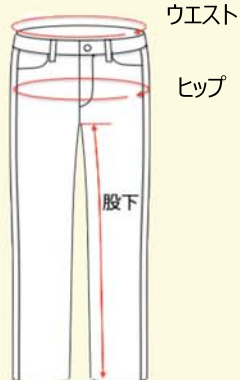

サイズ表（男女兼用）

サイズ	ウエスト	ヒップ	股下
SS	68-80	98	63
S	80-90	100	65
M	84-100	105	68
L	90-108	108	68
LL	95-113	114	69

綿63%、ポリエステル35%
ポリエリレン2%（臀部のみ綿100%）
面ファスナー：ポリエステル

お問い合わせ先（正規販売店）

株式会社障害社 福祉用具事業所IRS（アイアールエス）

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺1-11-15大三ビル102

TEL:042-851-4579/FAX:042-851-4589

E-MAIL:irs@shogaisha.co.jp

受付時間 9:30～17:30（土日祝日、年末年始を除く）